


## Metpak- painemansetin käyttöohjeet

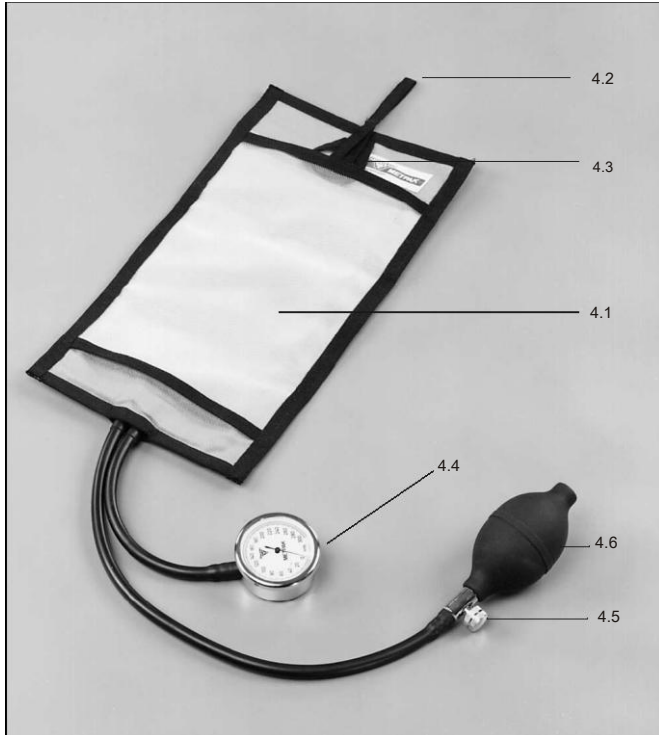

### Painemansetin osat:

- 4.1 mansetti ja verkkopussi nestettä varten
- 4.2 kiinnityslenkki
- 4.3 kaksiosainen kiinnityslenkki
- 4.4 mittari
- 4.5 ilmanvapautusventtiili
- 4.7 palje

### Tärkeää tietoa - lue ennen aloitusta

Olette hankkineet korkealaatuisen Riester- tuotteen, joka on valmistettu direktiivin 93/42 EEC vaatimuksien mukaisesti. Tutustu käyttöohjeisiin ennen laitteen käyttöä.

### Käyttötarkoitus:

Riester Metpak on tarkoitettu infuusionesteiden ja veren antamiseen nopeasti ja suurella volyymilla paineen avulla.

### MetPak- kokovaihtoehdot:

- 5270 Metpak 500ml
- 5275 Metpak 1000ml

### Käyttö:

1. Varmista, että sinulla on oikean kokoinen painemansetti infuusionesteille tai verelle (500ml tai 1000ml), riippuen minkä kokoista infuusiopussia itse käytät.
2. Varmista, että palje (4.6) ja ilmanvapautusventtiili (4.5) ovat yhdistetty toisiinsa ja että letkut ovat ehjät.
3. Sulje ilmanvapautusventtiili (4.5)
4. Pujota nestepussi verkkopussin sisälle niin, että saat pujotettua infuusiopussin yläosassa olevan kiinnitysaukon kaksiosaiseen kiinnityslenkkiin (4.3).
5. Pujota kiinnityslenkki (4.2) kaksiosaisen kiinnityslenkin (4.3) alimman lenkin läpi ja ripusta painepussi infuusiolineeseen.
6. Pumppaa paljetta (4.6) käsin kunnes saat aikaan vaadittavan paineen. Saavutetun paineen näet mittarin taulusta. (4.4)

### Huomiotavaa:

- Älä koskaan ylitä mittarin maximipainetta, joka on 300mmHg.
- Älä yhdistä Metpak- painemansettia mihinkään muuhun laitteeseen.

### Painepussin vaihto:

1. Vedä palje (4.6) ja ilmanvapautusventtiili (4.5) irti letkusta.
2. Irrota mittari (4.4) letkusta.
3. Avaa painemansetin takana oleva tarranauha vetämällä takana löytyvästä lenkistä ulospäin.
6. Nosta painepussi letkuineen pois pussista.
7. Aseta uusi painepussi. Kiinnitä tarranauha ja aseta mittari lyhyemmän letkun päähän, palje ja ilmanvapautusventtiili pidemmän letkun päähän.

### Hoito:

#### Puhdistaminen, desinfiointi ja sterilointi:

Puhdista mittari ja palje aika ajoin hieromalla pehmeällä, nihkeällä liinalla. Desinfiointi ja sterilointi ei ole välttämätöntä, koska väline ei ole kontaktissa potilaaseen. Mansetti ja verkkopussi voidaan aika ajoin pestä pesukoneessa 60°C:ssa, painepussi, palje, ilmanvapautusventtiili ja mittari on poistettava pesun ajaksi. (Katso ohjeet ylhäältä: painepussin vaihto) Suorista mansetti ja verkkopussi käsin pesun jälkeen. Älä silitä silitysraudalla. Jatkuva peseminen voi vaikuttaa mansetin ja verkkopussin elinikään.

### Huomio!

#### Älä silitä silitysraudalla!

Älä koskaan altista mansettia ja verkkopussia suoralle auringonpaisteelle. Älä koske painemansetin osiin (mansetti ja verkkopussi, palje, letkut, mittari, ilmanvapautusventtiili) terävillä esineillä!

### Varaosat:

- 11235 painepussi 500ml tai 1000ml
- 11237 mansetti ja verkkopussi 500ml
- 11238 mansetti ja verkkopussi 1000ml
- 11239 mansetti ja verkkopussi painepussilla 500ml
- 11240 mansetti ja verkkopussi painepussilla 1000ml
- 11241 mittari
- 11242 palje
- 10363 ilmanvapautusventtiili

### Tekniset tiedot:

- Käyttöympäristön lämpötila: 10 °C - 40 °C, suhteellinen ilmankostetus 85 %
- Varastoinnin lämpötila: -20 °C - 70 °C, suhteellinen ilmankosteus 85%
- Mansetti ja verkkopussi: 500ml:n tai 1000ml:n muovisille infuusiopusseille.
- Mittari: skaala 0-300mmHg, säätö 2mmHg välein.
- Paineen lisääminen: manuaalisesti palkeen avulla
- Paineen laskeminen: ilmanvapautusventtiilin avulla

- Huolto ja kalibrointi: Metpak- painemansetti ja sen osat eivät tarvitse mitään erityistä ja säännöllistä huoltoa. Kalibrointia varten poista mittari letkusta ja pidä mittaria vaakatasossa, mikäli osoitin pysähtyy mittarin taulukossa nollaan, laite on tarkka. Mikäli osoitin ei pysähdy nollaan, voit toimittaa laitteen kalibroitavaksi maahantuojalle.

- Takuu Tuotteella on kahden vuoden takuu.

- Maahantuojat: MedKit Finland Oy, Haaranauontie 6, 90240 Oulu  
Puh. 044 3030 112, E-mail: [info@medkit.fi](mailto:info@medkit.fi), [www.medkit.fi](http://www.medkit.fi)

- Valmistaja: Rudolf Riester GmbH & Co., P.O. Box 35- DE-72417 Jungingen ([www.riester.de](http://www.riester.de))