

Mediseam -tyhjiölastojen yleiset käyttöohjeet:

1. Ennen tyhjiölastan asettamista, suorita vamman vaatimat esivalmistelut ja hoitotoimenpiteet.
2. Oikaise tyhjiölasta ja kiinnitysremmit suoraksi tasaisella alustalla. Tasoita lastan sisällä olevat täytyeryynt.
3. Aseta lasta tuettavan raajan alle. Muotoile lasta kääntämällä se raajan ympärille, aina kulloisenkin tilanteen edellyttämään asentoon.
4. Kiinnitä lastan remmit ja kiristä niitä hieman.
5. Kytke imupumpun letku lastassa olevaan tyhjiöventtiiliin niin, että letkun pistokepäätä napsahtaa kiinni venttiiliin.
6. Ime tyhjiöpumpulla lastasta ilmaa pois niin, että se hieman jäykistyy.
7. Tarkista vielä lastan muotoilu ja asento niin, että se parhaalla mahdollisella tavalla tukee vammautunutta raajaa.
8. Pidä tyhjiöpumppu pystyasennossa. Ime lasta tyhjiöpumpulla kovaksi. Irrota pumpun letkupistoke lastan venttiilistä painamalla venttiiliin sivulla olevasta painikkeesta. Venttiili sulkeutuu automaattisesti.
9. Kuljeta potilas jatkohoitoon.
10. Irrota lasta avaamalla kiinnitysremmien lukot ja kytkemällä lastan venttiiliin narulla kiinnitetty pistoke venttiiliin, jolloin venttiili aukeaa. Ilma virtaa takaisin lastaan ja lasta pehmenee. Poista lasta.
11. Käytön jälkeen puhdista lasta tarvittaessa lämpimällä vedellä käyttäen emäksistä pesuainetta, huuhtelee ja kuivaa hyvin. Jos käytät desinfiointiaineita, huuhtelee lasta vielä lopuksi lämpimällä vedellä ja kuivaa hyvin.
12. Tarkista lastan kunto ja toimivuus jokaisen käyttökerran jälkeen. Näin varmistat, että lasta on käyttövalmiina seuraavaa käyttökertaa varten.

Tyhjiölastan huolto:

1. Jos lasta ei riittävästä imusta huolimatta kovetu tai pehmenee kun imu on lopetettu, tarkista venttiilin kunto sekä etsi lastassa mahdollisesti oleva vuotokohta. Käytä paikkaamiseen esim. Liquisole kumi-muoviliimaa, Tangit PVC-U -liimaa tai Loctite 406 pikaliimaa ja erillistä paikkamateriaalia. Liimausohjeet liimapakkauksissa.
2. Jos vikaa ei löydy, ota yhteys valmistajaan.

MEDISEAM OY

Kouvolantie 429, 15550 Nastola (Lahti). Puh: 010 397 4500 Fax: 03 730 310 Kotipaikka: Lahti
Y-tunnus: 0640976-3 S.posti: mediseam@mediseam.fi Kotisivut: www.mediseam.fi