

Mediseam -tyhjiöpatjojen yleiset käyttöohjeet:

Mediseam-tyhjiöpatja on tarkoitettu loukkaantuneen potilaan kokovartalotuentaan onnettomuuspaikalla sekä siirrettäessä potilasta edelleen jatkohoitoon.

Potilaan hoidossa käytettävistä apuvälineistä päättää aina paikalla oleva hoitohenkilöstö.

1. Vie patja potilaan viereen, levitä patja suoraksi, aukaise potilasvöiden vyösoljet ja tasaa patjan sisällä oleva ryynitäyte tasaiseksi matoksi.
2. Siirrä potilas varovasti patjalle, käyttäen apuna esim. kauhapaaria, siirtolakanaa, tai muuten niin, että potilaan vartalo pysyy mahdollisimman suorassa asennossa. Patjan päällä siirtolakana myös suojaa patjaa, ja sillä on helppo siirtää potilas edelleen siirtopaareille.
3. Aseta potilaan pää patjassa olevan kuvan mukaan patjan yläreunan tasolle (tai tyynylle, mallit TP280/TP360) niin, että tyynyn paksumpi etureuna jää potilaan niskakaaren alle.
4. Muotoile patja potilaan vartalon mukaan. Taivuta patja sivuilta potilaan pääpuolesta niin että potilaan pää tukeutuu patjan tai patjatyynyn ja patjan väliin tukevasti.
5. Kiinnitä ja kiristä potilasvyöt alustavasti.
6. Kiinnitä tyhjiöpumpun pistoke patjan tyhjiöventtiiliin ja ime patjaa hieman kovemmaksi.
7. Työparina toimien, toinen henkilö varmistaa samalla patjan oikean muotoilun, sekä kiristää vielä potilasvyöt. Ime patja tyhjiöpumpulla täysin kovaksi ja irrota pumpun pistoke venttiilistä painamalla venttiilin metallista paininta.
8. Ennen potilaan siirtoa tarkista vielä, että potilas on kaikilta osin hyvin tuettu ja valmiina siirtoon ja jatkokuljetukseen.
9. Tartu patjan kantokahvoihin ja nosta potilas varovasti ilmaan (2 – 4 henkilöä) ja siirrä potilas paareille tai muuhun jatkokuljetusyksikköön.
10. Patjan avaaminen tapahtuu työntämällä venttiilipistoke tyhjiöventtiiliin, jolloin ilma virtaa takaisin patjaan ja patja pehmenee sekä avaamalla potilasvyöt. Nyt potilas on siirrettävissä jatkotoimenpiteitä varten patjalta.
11. Käytön jälkeen puhdista patja vedellä ja emäksisellä pesuaineella, huuhtelee ja kuivaa hyvin. Jätä patja kuivumaan suorana ilmavaan tilaan. Jos käytät desinfioivia puhdistusaineita, huuhtelee patja vielä sen jälkeen vedellä. Desinfektioaineet haihduttavat runsaasti käytettyinä patjamateriaalissa olevia pehmikeaineita ja näin ollen kovettavat patjan pintamateriaalia.
12. Tarkista patjan kunto ja toimivuus jokaisen käyttökerran jälkeen. Näin varmistat, että patja on taas käyttövalmis seuraavaa käyttökertaa varten.

Tyhjiöpatjan huolto:

1. Jos patja pehmenee tyhjiöinnin jälkeen nopeasti, etsi patjan pinnasta mahdollisia vuotokohtia (naarmut, hankautumat, selvät pintavauriot). Paikkaa kaikki löydetyt vuotokohdat. TP280 ja TP360 patjan tyhjiöosan voi vetää ulos patjan jalkopäässä olevan tarra-aukon kautta, työntämällä ensin venttiili patjan pintakankaassa olevan aukon läpi patjan sisään. Tarkista venttiilin kunto sekä etsi tyhjiöosassa mahdollisesti oleva vuotokohta ja paikkaa se esim. Liquisole kumi-muoviliimalla tai Loctite 406 pikaliimalla ja paikkalapulla. Tarkemmat ohjeet liimapakkauksessa. Paikkausten jälkeen testaa patjan toimivuus, ja tarvittaessa toista menettely.
2. Jos vikaa ei löydy ota yhteys valmistajaan.

MEDISEAM OY

Kouvolaantie 429, 15550 Nastola (Lahti). Puh: 010 397 4500 Fax: 03 730 310 Kotipaikka: Lahti
Y-tunnus: 0640976-3 S.posti: mediseam@mediseam.fi Kotisivut: www.mediseam.fi