

WoundClot

Hemostaattiside

WoundClot on steriili, biohajoava ja painevapaa hemostaattiside, jota voidaan käyttää monenlaisten verenvuotojen kontrolloimiseen aina naarmuista valtimoverenvuotoihin.


WoundClot on suunniteltu erityisesti mm. ensivastehenkilöstön ja militarian käyttöön. Helppokäyttöisyytensä vuoksi myös kouluttamattomat henkilöt voivat käyttää sidettä.

Haavassa ollessaan side muuttuu geelimäiseksi, jolloin se on helppo irrottaa haavasta ilman, että luonnollinen hyytymä vahingoittuu tai pehmytkudos venyy.

WoundClot on kokoonsa nähden erittäin imukykyinen. Ks. vertailu alla.



- steriili
- painevapaa kiinnittyminen
- nopeuttaa luonnollista hyytymisprosessia
- kiinnittyy vahvasti haavaan vuodon aikana
- nopea ja helppo käyttää
- erittäin imukykyinen
- voidaan käyttää kaikenlaisiin verenvuotoihin
- ei vaadi koulutusta
- voidaan irrottaa vuotokohdasta vahingoittamatta luonnollista hyytymää tai venyttämättä kudosta

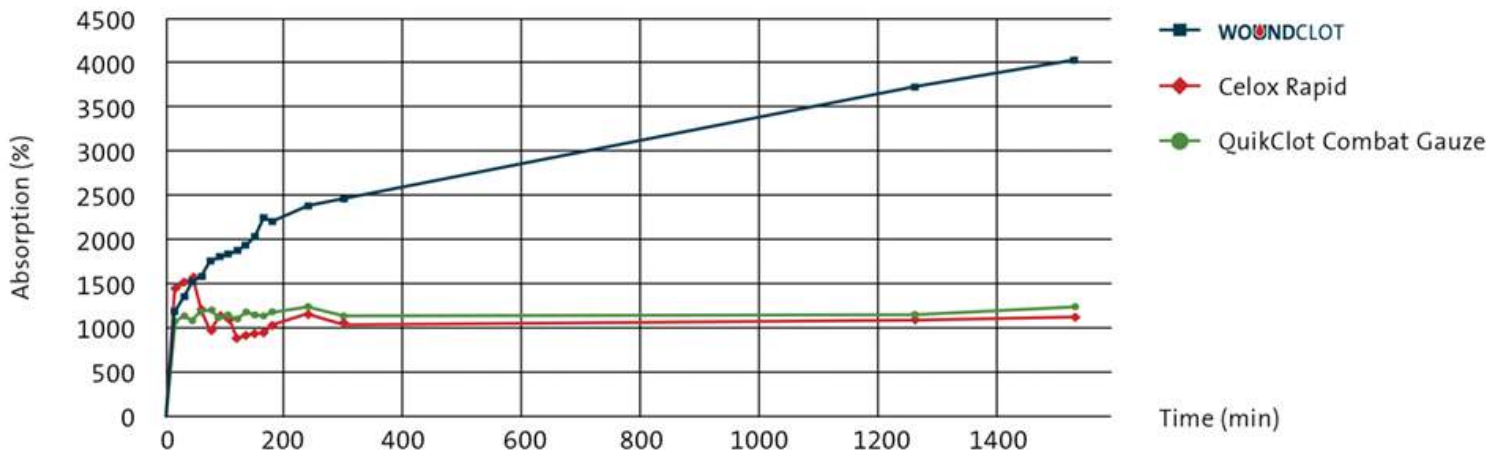



2 minuutin kuluttua



6 minuutin kuluttua



8 minuutin kuluttua

Kun WoundClot asetetaan vuotokohdan päälle ja sitä painetaan kevyesti, se muodostaa kudokseen kiinnittyvän geelin pysäyttäen verenvuodon. Mitä kovempaa verenvuoto on, sitä paremmin hemostaatti kiinnittyy kudokseen. Haavassa ollessaan side muuttuu nopeasti geelimäiseksi.

Kun verenvuoto on loppunut, hemostaatin kiinnitys haavassa heikkenee, jolloin se on helppo irrottaa. Geeliksi muuttunut sidos poistetaan kääntämällä sitä haavassa veden tai suolapitoisen liuoksen avulla. Sidos voidaan poistaa haavasta yhtenäisenä vahingoittamatta luonnollista hyytymää tai venyttämättä pehmytkudosta.



WoundClot ABC

Advanced Bleeding Control

Tuotekoodi	Koko	Hinta (alv 0%)
WC5X5	5 cm x 5 cm	10,00 €
WC5X10	5 cm x 10 cm	12,00 €
WC10X10	10 cm x 10 cm	15,00 €



WoundClot Trauma

Tuotekoodi	Koko	Hinta (alv 0%)
WC8X20	8 cm x 20 cm	22,00 €
WC8X100	8 cm x 100 cm	48,00 €

